

Airstretcher® series

エアーストレッチャー®は医療用搬送具として米国FDA（米国連邦食品衛生薬事局）、MDM（メディカル・デバイス・マニュファクチャリング）の認定・登録を日本で初めてそれぞれ取得しました。



ヘビーキャリア™

TRIPLE / トリプル

商品番号 NMB-02C

● 1台1台
手作りで製作!!



新生児搬送具 (2~3人用)

いざという時、
両手が使えるベビーキャリアを!!
— こんな現場からのご意見から開発されました。

- 軽く・強く・コンパクトに!!
- 組み立て簡単・安心設計!!
- 両手が使用できる安全設計!!

仕様

商品名：ヘビーキャリア・トリプル
(新生児搬送具：2~3人用)
TRIPLE/トリプル
使用時：48cm×56cm×高さ23cm
収納時：52cm×64cm×厚さ10cm
重さ：約2.7kg
色：オレンジ（国際セーフティーカラー）
加工：防水加工
Y字型サスペンダーベルト：
1本（強力ナイロン繊維
・バックルY.K.K50mm）
ウエストベルト：
1本（強力ナイロン繊維
・バックルY.K.K50mm）
※キャリアバック付

特徴

- ◎ 構造がシンプルなので簡単に組み立て、装着できます。
- ◎ 上部カバーに窓が付いており新生児の様子が確認できます。
- ◎ 側面、底部にクッションが入っており、搬送時の新生児への負担を軽減します。
- ◎ 最大荷重、約20kg（5kg程度の新生児・3人位を目安）

写真提供：奥州市・産婦人科おいなお医院

組み立て簡単

①



▶ キャリアバッグから取り出すと写真のように十字型に設計されています。

②



▶ コーナーバックル4ヶ所（計8個のバックル）をロックするだけです。

③



▶ 赤ちゃんをベビーキャリアに移す時は必ず平らな所で作業を行って下さい。赤ちゃんは5kg程度の新生児3人位を目安として下さい。

④



▶ 赤ちゃんの頭部位置にタオルなどをたたみ、枕にすると頭が安定します。ベビーキャリアシェル（布部）には、クッション材が敷かれているのでショックを和らげます。

⑤



▶ 安全を考えた窓付き保護カバー（赤ちゃんの顔を確認できます）をセットして完了です。

⑥



▶ Y字型サスペンダーベルトを従来型より幅広にし、パットを入れ肩の負担を少なくしました。

⑦



▶ ウエストベルトを従来型より幅広にし、ベルトを貫通させ腰を自由に回すことができるようになりました。

⑧



▶ 肩・腰への負担を軽減させる設計に改良しました。

⑨



▶ 階段等を降りる時は、足元が見えづらくなりますので、ベビーキャリアを左右どちらかに移動させてくだると安全です。

www.airstretcher.jp

お問合せは、株式会社未来 TEL:03-6869-9588 迄ご連絡ください。